

Vertrieb durch/Distribution by:
FOR LIFE Produktions- und Vertr.ges.
für Heil- und Hilfsmittel mbH
Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin
www.forlife.info



Hersteller/Manufacturer:
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.
Unit 93, Building 12, No. 818,
Qiming Road, Yinzhou, 315105
 Ningbo, Zhejiang, China

Gebrauchsanweisung für Urinbeutel ohne Ablauf unsteril

Gültig für: KB2000oA

Versionsnr.: KB2000oA.09.16 Freigabedatum: 09.2016 Revisionsnr.: 1

Beschreibung:

Der Urinbeutel ist erhältlich in der Größe 2000ml. Der Urinbeutel besteht aus PVC. Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt.

Indikation:

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird sowie der Ableitung des aufgefangenen Urins. Es ist besonders geeignet für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähige und bettlägerige Patienten.

Kontraindikation:

Nein

Nebenwirkungen:

Keine

Messfunktion:

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.

Gebrauchsanweisung:

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Hängen Sie den Beutel in Höhe der Blase oder unter der Höhe der Blase auf.
- Das Austauschen des Urinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, den Beutel fachgerecht entsorgen.

Sicherheitshinweise:

- Nur für den Einzelgebrauch. Nach der Nutzung im Sondermüll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes bis hin zum Funktionsausfall beeinträchtigen.
- Dieses Gerät sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht hängen, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knicke vorhanden hängen.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder in hoher Feuchtigkeit lagern.

Vertrieb durch/Distribution by:
 FOR LIFE Produktions- und Vertr.ges.
 für Heil- und Hilfsmittel mbH
 Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin
www.forlife.info



Hersteller/Manufacturer:
 Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.
 Unit 93, Building 12, No. 818,
 Qiming Road, Yinzhou, 315105
 Ningbo, Zhejiang, China

Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Nicht steril



Bevollmächtigter
 Repräsentant



Latex frei



Beinhaltet DEHP



Extreme Temperaturen



Nicht zur Wieder-
 verwendung geeignet



Hersteller



Herstellungsdatum



Verwendbar bis



Benannte Stelle
 TÜV Rheinland



Bestellnummer



Lot-/Chargennummer




Gebrauchsanweisung



Achtung



Hohe Feuchtigkeit

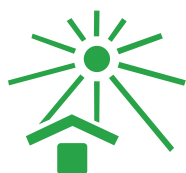

Direktes Sonnenlicht

Vertrieb durch/Distribution by:
 FOR LIFE Produktions- und Vertr.ges.
 für Heil- und Hilfsmittel mbH
 Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin.

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.
 Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,
 Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China

Greatcare Medical GmbH
 Gilddenweg 6, 50354 Hürth, Germany

16558 10-2016 09-2021

Made in China

Schlauchlänge: 90 CM



Contains Phthalates:

There are no known residual risks for
 Children, pregnant or nursing women.



12465632

KB2000oA