

Vertrieb durch/Distribution by:  
FOR LIFE Produktions- und Vertr.ges.  
für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin  
[www.forlife.info](http://www.forlife.info)



Hersteller/Manufacturer:  
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.  
Unit 93, Building 12, No. 818,  
Qiming Road, Yinzhou, 315105  
Ningbo, Zhejiang, China

### Gebrauchsanweisung für Kombinierten Bett- und Beinbeutel steril

Gültig für: KBB1000-30s, KBB1000-60s, KBB1000-90s

Versionsnr.: KBB1000s.09.16 Freigabedatum: 09.2016 Revisionsnr.: 1

#### Beschreibung:

Der Urinbeutel ist erhältlich in der Größe 1000ml. Der Urinbeutel besteht aus PVC und setzt sich zusammen aus einem Urinbeutel mit Abflussfunktion und einer Steuereinheit (Einlass und Ablassrohr, Abflussventil). Der Schlauch des Urinbeutels enthält einen selbstverschließenden Zugang, der es erlaubt, frischen Urin mit einem Entnahmegesäß zu sammeln. Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I steril und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt.

#### Indikation:

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird sowie der Ableitung des aufgefangenen Urins. Es ist besonders geeignet für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähige und bettlägerige Patienten. Der Urinbeutel kann als Beinbeutel und Bettbeutel genutzt werden.

#### Kontraindikation:

Nein

#### Nebenwirkungen:

Keine

#### Messfunktion:

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.

#### Gebrauchsanweisung:

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Hängen Sie den Beutel in Höhe der Blase oder unter der Höhe der Blase auf.
- Schließen Sie das Ablassventil, bevor der Beutel mit dem Patienten verbunden wird. Das Austauschen des Urinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, öffnen Sie das Ablassventil und entleeren Sie den Inhalt in einen geeigneten Sammelbehälter.
- Danach schließen und reinigen Sie das Ablassventil. Nutzen Sie zur Reinigung ein Desinfektionstuch und entfernen Sie mit dessen Hilfe alle Rückstände am Ablassventil.
- Zur Entnahme frischen Urins ein geeignetes Entnahmegesäß durch die Öffnung im Schlauch einführen, während der Patient uriniert.

#### Sicherheitshinweise:

- Nur für den Einzelgebrauch. Nach der Nutzung im Sondermüll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet oder resterilisiert werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes bis hin zum Funktionsausfall beeinträchtigen.
- Dieses Gerät sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht hängen, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knicke vorhanden hängen.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder in hoher Feuchtigkeit lagern.

Vertrieb durch/Distribution by:  
FOR LIFE Produktions- und Vertr.ges.  
für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin  
[www.forlife.info](http://www.forlife.info)



Hersteller/Manufacturer:  
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.  
Unit 93, Building 12, No. 818,  
Qiming Road, Yinzhou, 315105  
Ningbo, Zhejiang, China

### Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Sterilisiert mit Ethylenoxid



Bevollmächtigter Repräsentant



Latex frei



Beinhaltet DEHP



Nicht resterilisieren



Nicht zur Wiederverwendung geeignet



Hersteller



Herstellungsdatum



Verwendbar bis



Benannte Stelle TÜV Rheinland



Bestellnummer



Lot-/Chargennummer



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Achtung



Hohe Feuchtigkeit



Direktes Sonnenlicht



Extreme Temperaturen



Gebrauchsanweisung

#### Vertrieb durch/Distribution by:

FOR LIFE Produktions- und Vertr.ges.  
für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin.

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.  
Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,  
Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China

Greatcare Medical GmbH  
Gildenweg 6, 50354 Hürth, Germany

LOT 16558    10-2016    09-2021

Made in China

Schlauchlänge: 30 & 60 & 90 CM

Contains Phthalates :  
There are no known residual risks for Children, pregnant or nursing women.



PZN 12465709, 12465715, 12465721

REF KBB1000-30, 60, 90