



## **Gebrauchsanweisung für 1-Kammer Beinbeutel unsteril**

**Gültig für: KBB750-60**

**Versionsnr.: KBB750.07.17**

**Freigabedatum: 08.2017**

**Revisionsnr.: 02**

### **Beschreibung:**

Der Beinbeutel ist erhältlich in der Größe 750ml. Er besteht aus PVC-Folie medizinischer Qualität und wird mit einem knickfesten PVC-Schlauch sowie Rückschlagventil gefertigt. Er setzt sich zusammen aus einem Beinbeutel mit Abflussfunktion und einer Steuereinheit (Einlass und Ablassrohr sowie Abflussventil). Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Der Adapter ermöglicht mittels handelsüblichem Tannenzapfen-Konnektor den Anschluss an einen weiteren Urinbeutel. Außerdem ist er mit verstärkten, dehnbaren Riemchen ausgestattet, die es erlauben, den Beutel am Patientenbein anzulegen.

### **Indikation:**

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird sowie der Ableitung des aufgefangenen Urins. Es ist besonders für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähige und bettlägerige Patienten geeignet.

**Kontraindikation:** Nein

**Nebenwirkungen:** Keine

### **Messfunktion:**

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.

### **Gebrauchsanweisung:**

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Fixieren Sie den Beinbeutel am Bein des Patienten unterhalb der Blase. Liegt der Patient, hängen Sie den Beinbeutel auf Höhe oder unterhalb der Blase auf.
- Schließen Sie das Ablassventil, bevor Sie den Beutel mit dem Katheter oder einem anderen Medizinprodukt verbinden. Das Austauschen des Beinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, öffnen Sie das Ablassventil und entleeren Sie den Inhalt in einen geeigneten Sammelbehälter.
- Danach schließen und reinigen Sie das Ablassventil. Nutzen Sie zur Reinigung ein Desinfektionstuch und entfernen Sie mit dessen Hilfe alle Rückstände am Ablassventil.
- Bei Verbindung des Beinbeutels mit einem Urinbeutel muss sichergestellt werden, dass die Verbindung luftdicht abgeschlossen ist.
- Der angeschlossene Urinbeutel muss sich unterhalb des Beinbeutels befinden.

### **Sicherheitshinweise:**

- Nur für den Einmalgebrauch. Nach der Nutzung im Müll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes bis hin zum Funktionsausfall beeinträchtigen.
- Dieses Gerät sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht sein, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knicke vorhanden sein.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder bei hoher Feuchtigkeit lagern.

## Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Unsteril



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft



Latexfrei



Enthält oder Anwesenheit von Phthalaten



Temperaturbegrenzung



Nicht wiederverwenden



Hersteller



Herstellungsdatum (Datumsformat JJJJ-MM)



Verwendbar bis (Datumsformat JJJJ-MM)



Konform zur 93/42/EWG



Artikelnummer



Chargencode




Gebrauchsanweisung beachten



Achtung



Trocken aufbewahren

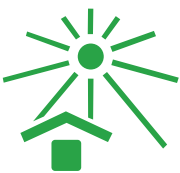


Von Sonnenlicht fernhalten

### Vertrieb durch/Distribution by:

For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Wendenschloßstraße 142, D-12557 Berlin

 Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.  
Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,  
Yinzhou 315105 Ningbo, Zhejiang, China

 Greatcare Medical GmbH  
Bonner Str. 31, 50389 Wesseling, Germany

 17411  2017-08  2022-07

Made in China

Schlauchlänge: **60 CM**



### Contains Phthalates:

There are no known residual risks for Children, pregnant or nursing women.



**PZN 12465572**

**REF KBB750-60**