



Gebrauchsanweisung für Urinbeutel mit Ablauf unsteril

Gültig für: KB2001mA

Versionsnr.: KB2001mA.08.17 Freigabedatum: 08.2017

Revisionsnr.: 01

Beschreibung:

Der Urinbeutel ist erhältlich in der Größe 2000ml. Er besteht aus PVC-Folie medizinischer Qualität und setzt sich zusammen aus einem Urinbeutel mit Abflussfunktion und einer Steuereinheit (Einlass und Ablassrohr sowie Ablassventil). Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt.

Indikation:

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird sowie der Ableitung des aufgefangenen Urins. Es ist besonders für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähige und bettlägerige Patienten geeignet.

Kontraindikation: Nein

Nebenwirkungen: Keine

Messfunktion:

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.

Gebrauchsanweisung:

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Fixieren Sie den Beutel in Höhe oder unterhalb der Blase.
- Schließen Sie das Ablassventil, bevor Sie den Beutel mit dem Katheter oder einem anderen Medizinprodukt verbinden. Das Austauschen des Urinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, öffnen Sie das Ablassventil und entleeren Sie den Inhalt in einen geeigneten Sammelbehälter.
- Danach schließen und reinigen Sie das Ablassventil. Nutzen Sie zur Reinigung ein Desinfektionstuch und entfernen Sie mit dessen Hilfe alle Rückstände am Ablassventil.

Sicherheitshinweise:

- Nur für den Einmalgebrauch. Nach der Nutzung im Müll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes beeinträchtigen und bis hin zum Funktionsausfall führen.
- Dieses Produkt sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht hängen, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knicke vorhanden sein.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder bei hoher Feuchtigkeit lagern.

Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Unsteril



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft



Latexfrei



Enthält oder Anwesenheit von Phthalaten



Temperaturbegrenzung



Nicht wiederverwenden



Hersteller



Herstellungsdatum (Datumsformat JJJJ-MM)



Verwendbar bis (Datumsformat JJJJ-MM)



Konform zur 93/42/EWG



Artikelnummer



Chargencode




Gebrauchsanweisung beachten



Achtung




Trocken aufbewahren

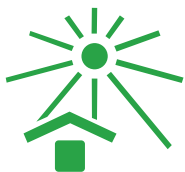

Von Sonnenlicht fernhalten

Vertrieb durch/Distribution by:

For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH
Wendenschloßstraße 142, D-12557 Berlin

 Ningbo Greatcare Trading Co.,Ltd.
Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,
Yinzhou 315105 Ningbo, Zhejiang, China

 Greatcare Medical GmbH
Bonner Str. 31, 50389 Wesseling, Germany

 17411  2017-08  2022-07

Made in China

Schlauchlänge: **130 CM**



Contains Phthalates:

There are no known residual risks for Children, pregnant or nursing women.



PZN 13828002

REF KB2001mA