

## Gebrauchsanweisung für Urinbeutel steril

**Gültig für: KU8**

### **Beschreibung:**

Der Urinbeutel ist erhältlich in der Größe 2000ml. Er besteht aus PVC-Folie medizinischer Qualität und wird mit einem knickfesten PVC-Schlauch sowie Rückschlagventil gefertigt. Er setzt sich zusammen aus einem Urinbeutel mit Abflussfunktion und einer Steuereinheit (Einlass und Ablassrohr sowie Abflussventil). Der Schlauch des Urinbeutels enthält einen selbstverschließenden Zugang, der es erlaubt, frischen Urin mit einem Entnahmegerät zu sammeln.

Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I steril und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt.

### **Indikation:**

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird sowie der Ableitung des aufgefangenen Urins. Es ist besonders für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähige und bettlägerige Patienten geeignet.

**Kontraindikation:** Nein

**Nebenwirkungen:** Keine

### **Messfunktion:**

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.






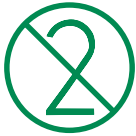









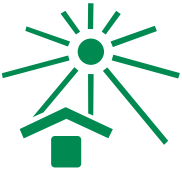
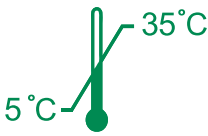


### **Gebrauchsanweisung:**


- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Hängen Sie den Beutel in Höhe oder unterhalb der Blase auf.
- Schließen Sie das Ablassventil, bevor Sie den Beutel mit dem Katheter oder einem anderen Medizinprodukt verbinden. Das Austauschen des Urinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, öffnen Sie das Ablassventil und entleeren Sie den Inhalt in einen geeigneten Sammelbehälter.
- Danach schließen und reinigen Sie das Ablassventil. Nutzen Sie zur Reinigung ein Desinfektionstuch und entfernen Sie mit dessen Hilfe alle Rückstände am Ablassventil.
- Zur Entnahme frischen Urins ein geeignetes Entnahmegerät durch die Öffnung im Schlauch einführen, während der Patient uriniert. Den Urin während der Entnahme regulieren.
- Zur Urinregulierung das Gerät am Schlauch nutzen sowie sicherstellen, dass der Urin frei fließen kann und sich nicht staut.

### **Sicherheitshinweise:**

- Nur für den Einmalgebrauch. Nach der Nutzung im Müll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet oder resterilisiert werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes beeinträchtigen und bis hin zum Funktionsausfall führen.
- Dieses Produkt sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht hängen, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knick vorhanden sein.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder bei hoher Feuchtigkeit lagern.

## Bedeutung der Symbole auf der Verpackung

				
Sterilisiert mit Ethylenoxid	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	Enthält oder Anwesenheit von Phthalaten	Nicht erneut sterilisieren	Ist ein Medizinprodukt
				
Nicht wiederverwenden	Hersteller	Herstellungsdatum (Datumsformat JJJJ-MM)	Verwendbar bis (Datumsformat JJJJ-MM)	Anzahl / Stück
				
Artikelnummer	Chargencode	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Achtung	Trocken aufbewahren
				
Von Sonnenlicht fernhalten	Temperaturbegrenzung 5°C - 35°C	Gebrauchsanweisung beachten	CE-Kennzeichen mit Kennnummer der benannten Stelle	

 **Contains Phthalates:**  
There are no known residual risks for Children, pregnant or nursing women.

Schlauchlänge: **120 CM**

 For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Am Studio 16, D-12489 Berlin

**PZN 12465661**

 **KU8**